

POKYNY K OPRACOVÁNÍ A KRYSTALIZACI BLOČKŮ AIDITE CAMEO

Opracování:

1. K opracování se používají nástroje na opracování keramiky. Při použití nevhodných nástrojů může dojít k deformaci práce.
2. Při opracování nesmí vznikat žádné vibrace jinak může dojít k poškození práce.
3. Práci neodkládejte na hrubé povrchy, doporučuje se pokládat na houbičku.

Krystalizace a glazování

Před sintrací je tento produkt fialový, až po správném vypálení změní barvu na finální odstín zubu.

Dvě metody:

1. Krystalizace a glazování zároveň
2. První krystalizace a poté glazování

Křivka pro krystalizaci

<i>počáteční teplota</i>	<i>doba sušení</i>	<i>rychlost stoupání</i>	<i>nejvyšší teplota</i>	<i>setrvání</i>	<i>volné klesání</i>
450°C	4min	40°C/min	840°C	2min/6min	300°C

Poznámky k sintraci a glazování:

1. Maximální teplota doby setrvání pro inlay jsou 2 minuty. Pro sólo korunky a můstky je teplota setrvání maximálně 6 minut.
2. Chladnutí by mělo probíhat přirozenou cestou bez použití urychlovačů chlazení.
3. Při sintraci musí být sintrovací pasta uvnitř korunky, aby se zabránilo deformacím.